



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	STERILIZZAZIONE AUSILI, PRESID E STRUMENTARIO MEDICO	Cod PR 24
		Rev. 00
		Pagina 1 di 4

1 Generalità

1.1 Obiettivi e mission

L'obiettivo è definire le modalità di impiego ed utilizzo di ausili, presidi e strumentario medico, quali:

- 1.1.1 guanti
- 1.1.2 camici
- 1.1.3 mascherine ed occhiali
- 1.1.4 ferri chirurgici
- 1.1.5
- 1.1.6
- 1.1.7

in sicurezza igienica, al fine di evitare contaminazioni e diffusioni di patologie varie.

1.2 Scopi

Lo scopo del presente protocollo è chiarire le modalità dello svolgimento di tutte le attività che interessano la salute fisica dell'ospite e degli operatori.

1.3 Applicabilità

Tale protocollo si applica ogni qualvolta si debbano eseguire servizi sanitari a favore dell'ospite da parte del personale diretto (dipendenti e/o collaboratori della Senior Residence s.r.l.), e da parte del personale autonomo (medici di Medicina Generale e medici specialisti vari)

1.4 Riferimenti normativi

D.G.R. 17/2005	Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n° 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria"
D.G.R. 25/2009	Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie

1.5 Documenti correlati

Servizio	Documenti correlati a cura di:		
	Senior Residence		Appaltatore servizi di gestione
Direzione Sanitaria	IL-S-19	Sterilizzazione presidi sanitari	
Infermieristico	PR-03	Gestione Farmaci	
	PR-14	Gestione Ausili	
	PR-15	Presidi Sanitari	
	PR_12	Gestione Rifiuti	

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	STERILIZZAZIONE AUSILI, PRESIDI E STRUMENTARIO MEDICO	Cod PR 24
		Rev. 00
		Pagina 2 di 4



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	STERILIZZAZIONE DEI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	Cod. IL-S-19
		Rev. 00
		Pagina 1 di 2

1. Finalità

1.1 Riduzione dei rischi

Al fine di minimizzare il rischio di trasmissione e di contaminazione con materiale non sterile i presidi medico-chirurgici utilizzati sono suddivisi in 2 categorie:

1.1.1 Monouso

1.1.2 Pluriuso e Riutilizzabili

2. Strumenti monouso - Modalità di esercizio

1.1 Modalità di trattamento ed eliminazione del materiale monouso

- Prima dell'utilizzo controllare l'integrità della confezione e la data di scadenza
- Aprire la confezione immediatamente prima dell'utilizzo seguendo le indicazioni previste dalle istruzioni dello specifico presidio (con particolare attenzione quando si tratti di presidio sterile)
- Il Presidio, dopo l'utilizzo, deve essere smaltito seguendo le procedure previste da PR-12, punto 2.5 (Rifiuti Speciali – Farmaci e residui sanitari)

3. Strumenti pluriuso - Modalità di esercizio

3.1 Modalità di trattamento

Tutti i presidi chirurgici riutilizzabili venuti a contatto con materiale biologico, devono essere trattati in due fasi, allo scopo di:

- Tutelare l'operatore che manipola lo strumentario
- Ridurre le contaminazioni batteriche
- Ridurre la possibilità di infezioni

3.2 Decontaminazione

3.2.1 Attrezzature e risorse

- Vaschette per immersione dei presidi
- Ausili di protezione alle mani: guanti in gomma monouso o pluriuso
- Ausili di protezione agli occhi: occhiali
- Soluzione disinfettante a base di polifenoli (Femplus)

3.2.1 Procedure

- indossare i dispositivi di protezione individuale
- immergere i presidi aperti e smontati nella soluzione disinfettante
- lasciare immerso per circa 15 minuti
- estrarre per procedere alla fase di pulizia

3.3 Pulizia

3.3.1 Attrezzature e risorse

- Detergente Ph neutro (a base di tensioattivi Septozym)
- Acqua corrente, Scovoli e spazzole
- Ausili di protezione alle mani: guanti in gomma monouso o pluriuso
- Ausili di protezione agli occhi: occhiali
- Telo o carta per l'asciugatura

3.3.1 Procedure

- Indossare i dispositivi di protezione individuale
- Prelevare i presidi dalla soluzione decontaminante
- Detergere i presidi in ogni loro parte, con acqua e detergente, utilizzando scovoli e spazzole
- Risciacquare i presidi con acqua corrente
- Asciugare i dispositivi con telo o carta
- Posare i presidi su un telo asciutto e pulito
- Sciacquare spazzole scovoli con soluzione a base di ipoclorito di sodio

Senior Residence s.r.l. Sede operativa Via G Servais 80, 10146 Torino
Tel. 011-7720500 (r.a.) • fax: 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	STERILIZZAZIONE AUSILI, PRESIDI E STRUMENTARIO MEDICO	Cod PR 24
		Rev. 00
		Pagina 3 di 4



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	STERILIZZAZIONE DEI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	Cod. IL-S-19
		Rev. 00
		Pagina 2 di 2

3.4 Preparazione

3.4.1 Attrezzature e risorse

- vaschette/contenitori di metallo inox

3.4.2 Procedure

- Prelevare i ferri con l'utilizzo di guanti sterili
- Inserire nelle vaschette c/ coperchio il set completo di ferri costituito da:
 - 1) Pinza di Klemmer
 - 2) Pinza chirurgico e anatomica
 - 3) Forbici
 - 4) Sonda scanalata
- chiudere la vaschetta con il coperchio
- posizionare il nastro rivelatore di sigillo sul quale l'Infermiera:
 - scrive la data e l'ora del confezionamento, e il suo nome per conferma

3.5 Sterilizzazione

3.5.1 Attrezzature e risorse

- Stufa sterilizzatrice
- vaschette/contenitori di metallo inox

3.5.2 Procedure

- Posizionare sul contenitore d'acciaio la striscia di viraggio e riportare sulla stessa l'orario di inizio ciclo
- Inserire la vaschetta d'acciaio dentro lo sterilizzatore
- Accendere l'interruttore generale
- Impostare la temperatura e tempi (180 °C su 1 ora)
- Verificare l'avvenuta accensione della spia verde = funzionamento sistema
- Verificare l'avvenuta accensione della spia gialla = funzionamento termostato
- A fine ciclo assicurarsi che la striscia reattiva sia virata. Tale viraggio indica una efficace sterilizzazione
- **Verificare a fine ciclo che la spia gialla risulti spenta. Qualora fosse accesa il sistema ha rilevato un'anomalia. In questo caso la sterilizzazione non è andata a buon fine ed è necessario contattare la direzione per gli opportuni interventi**

3.6 Utilizzo

3.6.1 Attrezzature e risorse

- vaschette/contenitori di metallo inox

3.7 Conservazione e utilizzo

3.7.1 Attrezzature e risorse

- vaschette/contenitori di metallo inox

3.7.2 Procedure

La sterilizzazione è considerata efficace fino a 24 ore dal termine del ciclo di sterilizzazione

L'utilizzatore deve verificare:

- il corretto posizionamento del sigillo
- la corretta tempistica della sterilizzazione

3.8 Validazione del processo

Ad ogni ciclo, è inserito un rivelatore per assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature. Il test prevede l'inserimento delle striscie reattive nel contenitore di acciaio da sterilizzare e l'avvio del ciclo. Prima dell'utilizzo dei ferri, verificare il viraggio del test e confrontarlo con le indicazioni specificate nel test stesso. Se l'esito è negativo, segnalare l'accaduto alla Direzione. I test effettuati sono conservati per 1 mese da DSA.

data	Emissione	Controllo	Approvazione
01.09.2011			

Senior Residence s.r.l. Sede operativa Via G Servais 80, 10146 Torino
Tel. 011-7720500 (r.a.) • fax: 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	STERILIZZAZIONE AUSILI, PRESIDI E STRUMENTARIO MEDICO	Cod PR 24
		Rev. 00
		Pagina 4 di 4

2 Programmazione, realizzazione e controllo delle attività

2.1 Tutti gli ausili, presidi e strumentario medico di cui al punto 1.1 sono di tipologia monouso, e pertanto non sono soggetti ad interventi interni di disinfezione e sterilizzazione.

3 Attività svolte dall'appaltatore dei servizi di gestione integrata

3.1 Pianificazione della attività

3.1.1 La attività è pianificata con:
- Contratto di Appalto

3.2 Realizzazione delle attività

3.2.1 La attività è realizzata a mezzo:
- Fornitura ausili, presidi e strumentario medico

4 Non Conformità

Se la Responsabile DSA o la Responsabile della Qualità di Senior Residence rilevano non conformità alla presente procedura o fatti che richiedono azioni correttive o preventive o ancora fatti che ritengono opportuno segnalare per predisporre adeguati interventi, riportano gli estremi della Non Conformità, se minore, sul registro Non Conformità RGQ 01 relativo alla macroarea DSA.

Se la Non Conformità è di tipologia Maggiore è emesso un Rapporto di Non Conformità, RGQ 02, che descrive e gestisce adeguatamente la non conformità rilevata. Anche in questo caso è aggiornato il Registro Non Conformità RGQ 01.

data	Emissione	Controllo	Approvazione
31/12/2020	DSA	DSA/DGE	DGE