



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	STRUMENTI PER TAGLIO UNGHIE Modalità di disinfezione	Cod. INF 46
		Rev. 00
		Pagina 1 di 2

Il documento deve accompagnare sempre la bottiglia del liquido, anche nella fase di ricarica in infermeria

DISINFEZIONE STRUMENTI PER IL TAGLIO DELLE UNGHIE DEGLI OSPITI

L'obiettivo generale è quello di ottenere una decontaminazione degli strumenti fino a livelli ritenuti non pericolosi per la trasmissione di infezioni.

Gli strumenti (tronchesi) utilizzati dagli operatori per il taglio delle unghie degli ospiti vanno disinfettati prima di ogni uso.

COSA SERVE:

1. Emulsione liquida antisettica denominata FENPLUS HWP (Polifenoli) appositamente fornita alle Tutor alla concentrazione ottimale.
2. Recipiente per contenere la soluzione nella quale immergere il tronchese in uso

ISTRUZIONI

1. Lo strumento da trattare deve essere sottoposto prima ad accurata pulizia.
2. La soluzione antisettica fornita, contenuta nel recipiente in uso, **deve** essere sostituita ogni 24 ore
3. La soluzione antisettica in dotazione deve essere conservata in recipiente chiuso, al riparo dalla luce, possibilmente in un armadio chiuso. I flaconi devono essere forniti di etichette che segnalano le caratteristiche, le precauzioni d'impiego del prodotto e la concentrazione della soluzione.
4. Al momento dell'utilizzo versare la soluzione disinfettante in un recipiente di dimensioni contenute nella quantità di circa 10 ml. Gli strumenti devono stare in immersione nella soluzione già diluita all'1% per 5 minuti prima di ogni utilizzo.
5. Il prodotto è un disinfettante per strumenti e superfici, non è un antisettico cutaneo. Le misure di protezione richiedono di evitare ogni contatto con la cute, per cui è necessario l'utilizzo di guanti in lattice (Misure di protezione individuale).

Registro di carico recipienti, da effettuarsi a cura dell'infermiere

**La ricarica va effettuata con cadenza settimanale, in quanto le
proprietà disinfettanti del liquido decadono dopo 7 giorni**

Mese di		Nucleo		Scadenza
Preparazione del prodotto		Riempimento del flacone		
data	Infermiere che ha effettuato la preparazione	data	Infermiere che ha effettuato la ricarica	Data in cui deve essere effettuata la ricarica



SENIOR RESIDENCE

STRUMENTI PER TAGLIO UNGHIE**Modalità di disinfezione**Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino

Cod. INF 46

Rev. 00

Pagina 2 di 2

Tabella di carico giornaliero del contenitore degli strumenti:

giornalmente la operatrice del turno 6 provvede a cambiare il liquido disinfettante del contenitore degli strumenti. L'operazione verrà, di norma, effettuata a fine turno. La firma dell'operatore conferma l'avvenuta sostituzione del liquido

Mese di

giorno	ora	L'operatore
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it