



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	DEFIBRILLATORE verifiche periodiche	Cod. INF 41
		Rev. 01
		Pagina 1 di 2

Verifica giornaliera di funzionalità:

controllare che l'indicatore di stato sia **verde**. Quando l'indicatore è verde, l'AED è pronto per il soccorso. Se l'indicatore è **rosso**, fare riferimento alla tabella per la risoluzione dei problemi riportata a pag. 5-3. Del manuale e nella pag. 2/2 successiva

Mese di

giorno	ora	Stato	Infermiere
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
Passare alla verifica mensile			

Data Visto la D.S.

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it

DEFIBRILLATORE

verifiche periodiche

Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino

Cod. INF 41

Rev. 01

Pagina 2 di 2

Verifica mensile di funzionalità

Mese di		
passaggio	operazione	Stato (Positivo/Negativo)
1	Aprire lo sportello dell'AED	
2	Attendere che l'indicatore dell'AED indichi uno stato: verificare che il Led dell'indicatore di stato diventi rosso . Attendere 5 secondi, quindi verificare che sia tornato verde	
3	Controllare la data di scadenza degli elettrodi	
4	Ascoltare i comandi vocali	
5	Chiudere il coperchio e verificare che il Led dell'indicatore di stato diventi rosso . Attendere circa 5 secondi, quindi verificare che sia tornato verde	
6	Verifica scadenza piastre (indicare la data di scadenza)	

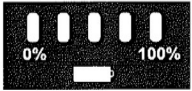
Data e firma infermiere per conferma

Data e firma Direzione Sanitaria per presa visione

Tabella di risoluzione dei problemi segnalati dagli indicatori

Di seguito viene riportata la tabella di risoluzione dei problemi segnalati dagli indicatori dell'AED.

Tabella 5-1: Tabella di risoluzione dei problemi segnalati dagli indicatori

Indicatore	Problema	Soluzione
	L'indicatore (LED) rosso Riparazione è acceso.	È necessario un intervento di manutenzione da parte del personale di assistenza autorizzato. Contattare il Servizio di assistenza Cardiac Science o, al di fuori degli Stati Uniti, rivolgersi al rappresentante Cardiac Science di zona.
	L'indicatore (LED) rosso degli elettrodi è acceso.	Collegare gli elettrodi o sostituirli con elettrodi nuovi.
	L'ultimo indicatore della batteria (rosso) è acceso.	Il livello della batteria è basso. Sostituire la batteria con una nuova.
	L'indicatore di stato Rescue Ready è rosso e nessun altro indicatore sul pannello diagnostico è acceso.	Sostituire la batteria. Se l'indicatore di stato rimane rosso, contattare il Servizio di assistenza Cardiac Science o, al di fuori degli Stati Uniti, rivolgersi al rappresentante Cardiac Science di zona.



ATTENZIONE: temperature estreme.

L'esposizione dell'AED a condizioni ambientali estreme, al di fuori dei parametri operativi specificati, può comprometterne la capacità di funzionamento corretto. L'autotest giornaliero Rescue Ready verifica l'impatto di condizioni ambientali estreme sull'AED. Se l'autotest giornaliero rileva condizioni ambientali che non rientrano nei parametri operativi dell'AED, l'indicatore Rescue Ready potrebbe diventare rosso a indicare che l'apparecchio non è pronto per avviare l'operazione di soccorso e potrebbe essere emesso il messaggio vocale "Contattare Assistenza Tecnica" che sollecita l'utente a spostare immediatamente l'AED in un luogo con condizioni ambientali che rientrano nei parametri operativi accettabili. Consultare il Capitolo 6, *Dati tecnici* per informazioni sulle condizioni ambientali ideali e la sezione *Indicatore di stato Rescue Ready*, a pagina 3-2 per informazioni sull'indicatore Rescue Ready.



ATTENZIONE: Rescue Ready disabilitato.

Anche fattori diversi da condizioni ambientali estreme possono causare la commutazione dell'AED sullo stato Rescue Ready disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere *Indicatore di stato Rescue Ready*, a pagina 3-2.